

## Herzlich Willkommen!

Seit August 2010 steht das web-basierte Untersuchungsportal für den GRSK e.V. komplett zur Verfügung. Tierärzte können die angefertigten Aufnahmen hochladen, Vereine können die Aufnahmen verwalten, und für die Gutachter steht ein leistungsfähiger DICOM-Viewer mit entsprechenden Messinstrumenten zur Verfügung. Diese Präsentation zeigt die Vorgehensweise für Tierärzte, Vereine und Gutachter.

## Vorgehensweise für Tierärzte

Tierärzte können Ihre digital angefertigten Röntgenaufnahmen bei [www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com) ganz einfach im DICOM-Format hochladen. Voraussetzung ist, dass die hochzuladenden Bilder auf einem beliebigen Laufwerk (Festplatte, Netzwerk, CD, ...) der jeweiligen Computeranlage zur Verfügung stehen. easyVET/easyIMAGE-Anwender können die Bilder unmittelbar aus der Software hochladen, für andere Anbieter stehen Programmier-Schnittstellen zur Verfügung.


[www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com) funktioniert mit jedem gängigen Browser (Mozilla Firefox, Internet-Explorer, Google Chrome, Safari, Opera). Vor dem ersten Hochladen versucht der Browser die aktuellste Version des Web-PlugIn Silverlight von Microsoft zu installieren, falls diese nicht bereits installiert ist.

Tierärzte, die diesen Service nutzen wollen, müssen bei [www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com) registriert und über die Überlassung einer Kopie der Approbationsurkunde authentifiziert sein. Die Nutzung des Services ist mit Kosten verbunden.

Vor der ersten Nutzung empfehlen wir das Studium der „Fragen und Antworten“ bei [www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com) im GRSK-Bereich.

## Vorgehensweise für Tierärzte


- **Schritt 1:** Anmeldung bei [www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com). Wer noch nicht registriert ist, muss eine Registrierung durchführen und ein Kopie der Approbationsurkunde an 0511/560696-99 faxen. Nur registrierte Tierärzte können den GRSK-Upload nutzen.

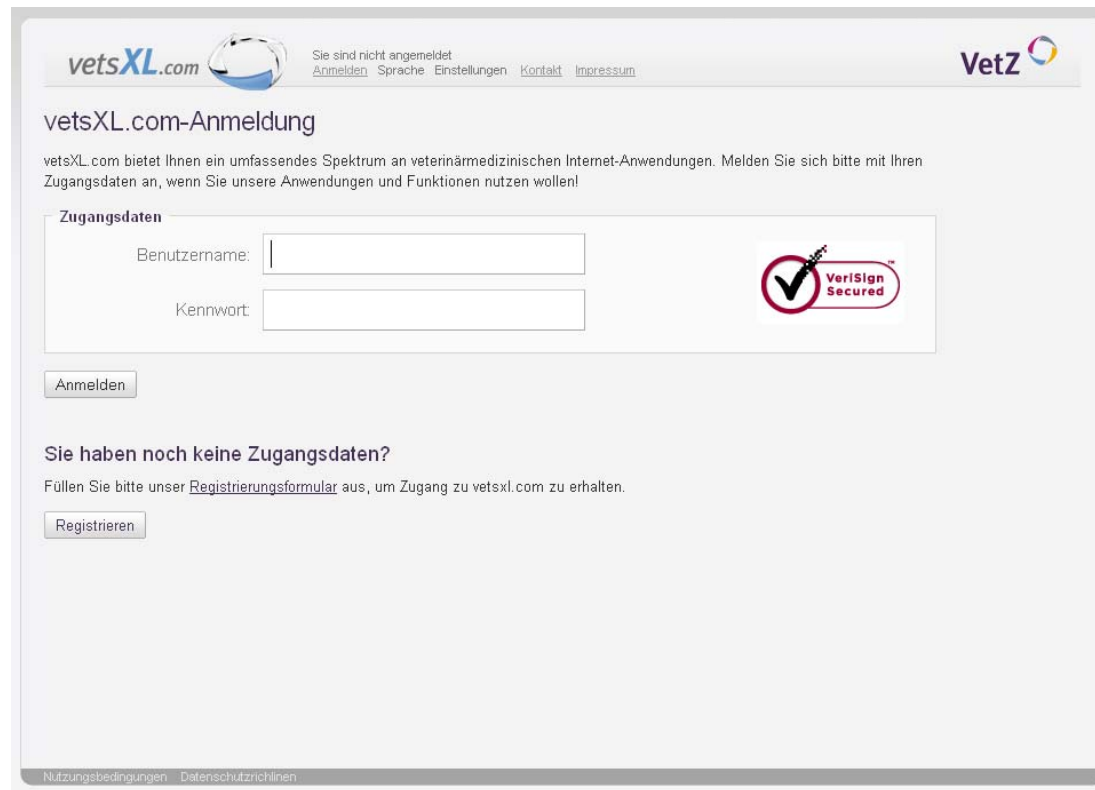

The screenshot shows the login page for vetsXL.com. At the top left is the vetsXL.com logo and a navigation menu with links for 'Anmelden', 'Sprache', 'Einstellungen', 'Kontakt', and 'Impressum'. At the top right is the VetZ logo. The main heading is 'vetsXL.com-Anmeldung'. Below it is a paragraph explaining the service: 'vetsXL.com bietet Ihnen ein umfassendes Spektrum an veterinärmedizinischen Internet-Anwendungen. Melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an, wenn Sie unsere Anwendungen und Funktionen nutzen wollen!'. There is a 'Zugangsdaten' section with two input fields: 'Benutzername:' and 'Kennwort:'. To the right of these fields is a 'VeriSign Secured' logo. Below the input fields is an 'Anmelden' button. Further down, there is a section titled 'Sie haben noch keine Zugangsdaten?' with a paragraph: 'Füllen Sie bitte unser [Registrierungsformular](#) aus, um Zugang zu vetsxl.com zu erhalten.' and a 'Registrieren' button. At the bottom of the page, there are links for 'Nutzungsbedingungen' and 'Datenschutzrichtlinien'.

## Vorgehensweise für Tierärzte


- **Schritt 2:** Nach erfolgreicher Anmeldung muss der Menüpunkt „**HD/ED-Bilder hochladen (GRSK)**“ angeklickt werden um unmittelbar auf die Seite zum Hochladen der HD/ED-Aufnahmen zu gelangen.

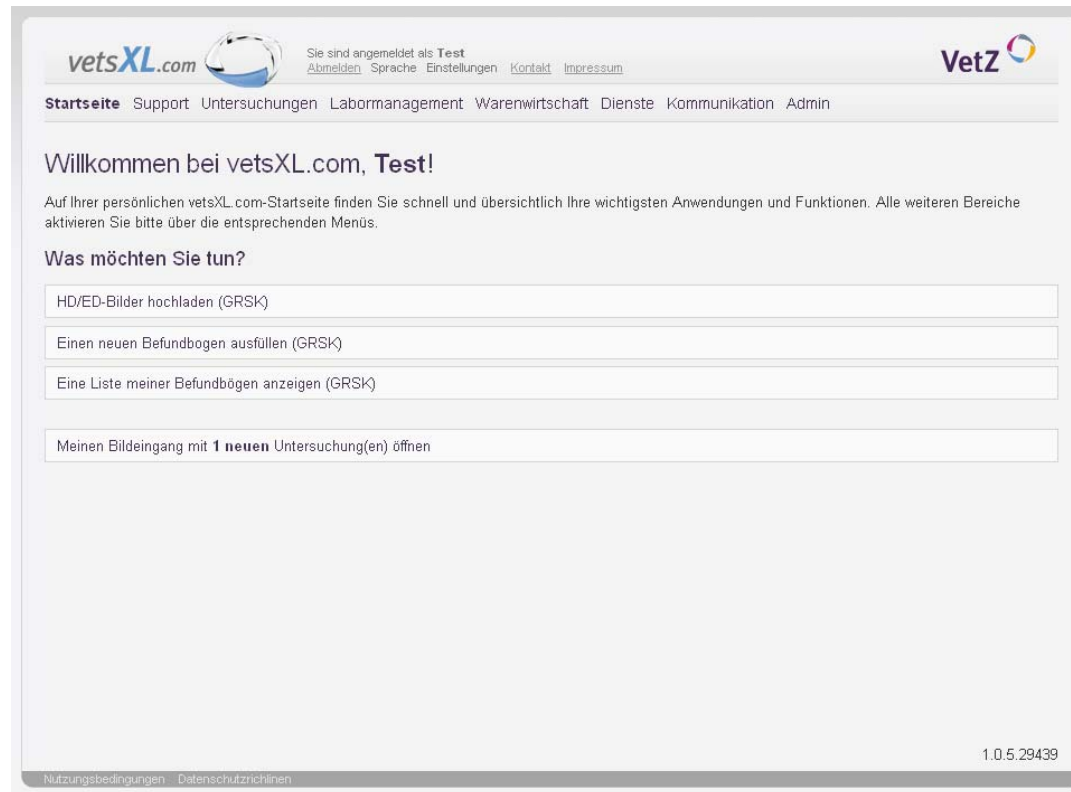

The screenshot shows the user interface of the vetsXL.com web application. At the top, there is a navigation bar with the vetsXL.com logo on the left, a user login status 'Sie sind angemeldet als Test' with links for 'Abmelden', 'Sprache', 'Einstellungen', 'Kontakt', and 'Impressum' in the center, and the VetZ logo on the right. Below the navigation bar is a menu with items: 'Startseite', 'Support', 'Untersuchungen', 'Labormanagement', 'Warenwirtschaft', 'Dienste', 'Kommunikation', and 'Admin'. The main content area starts with a welcome message: 'Willkommen bei vetsXL.com, Test!' followed by a brief instruction. Below this, a section titled 'Was möchten Sie tun?' contains four buttons: 'HD/ED-Bilder hochladen (GRSK)', 'Einen neuen Befundbogen ausfüllen (GRSK)', 'Eine Liste meiner Befundbögen anzeigen (GRSK)', and 'Meinen Bildeingang mit 1 neuen Untersuchung(en) öffnen'. The bottom of the page features a footer with 'Nutzungsbedingungen' and 'Datenschutzrichtlinien' on the left, and the version number '1.0.5.29439' on the right.

## Vorgehensweise für Tierärzte


- **Schritt 3:** Auf der nächsten Seite werden Rasse und Verein ausgewählt und damit der Gutachter für HD und ED festgelegt und angezeigt. Je nach Rasse und Verein öffnen sich anschließend automatisch die entsprechenden Bereiche für den HD und/oder ED-Bildupload.

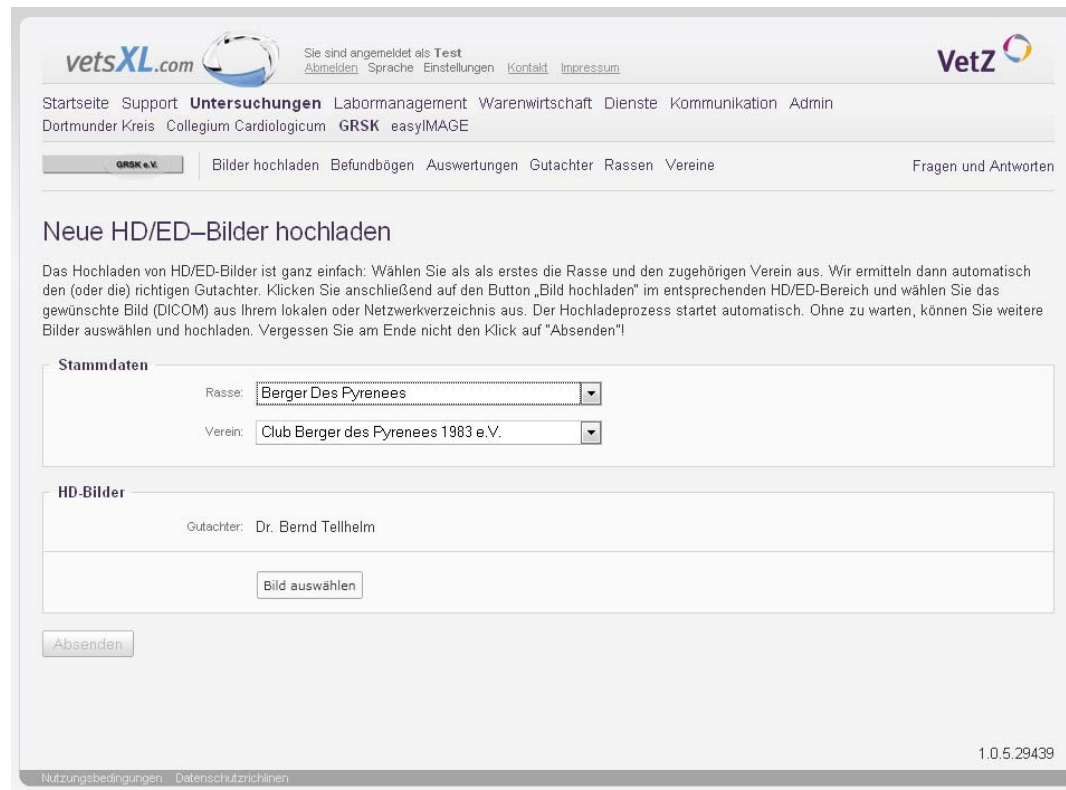

The screenshot shows the 'vetsXL.com' web interface. At the top, there is a navigation bar with the VetZ logo and a user login status: 'Sie sind angemeldet als Test'. Below this is a main menu with options like 'Startseite', 'Support', 'Untersuchungen', 'Labormanagement', 'Warenwirtschaft', 'Dienste', 'Kommunikation', and 'Admin'. A secondary menu includes 'Dortmunder Kreis', 'Collegium Cardiologicum', 'GRSK', and 'easyIMAGE'. The main content area is titled 'Neue HD/ED-Bilder hochladen' and contains instructions for uploading images. Below the instructions is a form with two dropdown menus for 'Rasse' (set to 'Berger Des Pyrenees') and 'Verein' (set to 'Club Berger des Pyrenees 1983 e.V.'). There is also a text field for 'Gutachter: Dr. Bernd Tellhelm' and a 'Bild auswählen' button. At the bottom of the form is an 'Absenden' button. The footer of the page includes 'Nutzungsbedingungen', 'Datenschutzrichtlinien', and the version number '1.0.5.29439'.

## Vorgehensweise für Tierärzte

- **Schritt 4:** Mit dem Button „Bild auswählen“ öffnet der Tierarzt nun seinen Windows-Explorer und wählt von seinem Laufwerk die entsprechende DICOM-Datei aus. Mit „Öffnen“ (je nach Betriebssystem kann der Button anders heißen) wird das ausgewählte Bild hochgeladen.

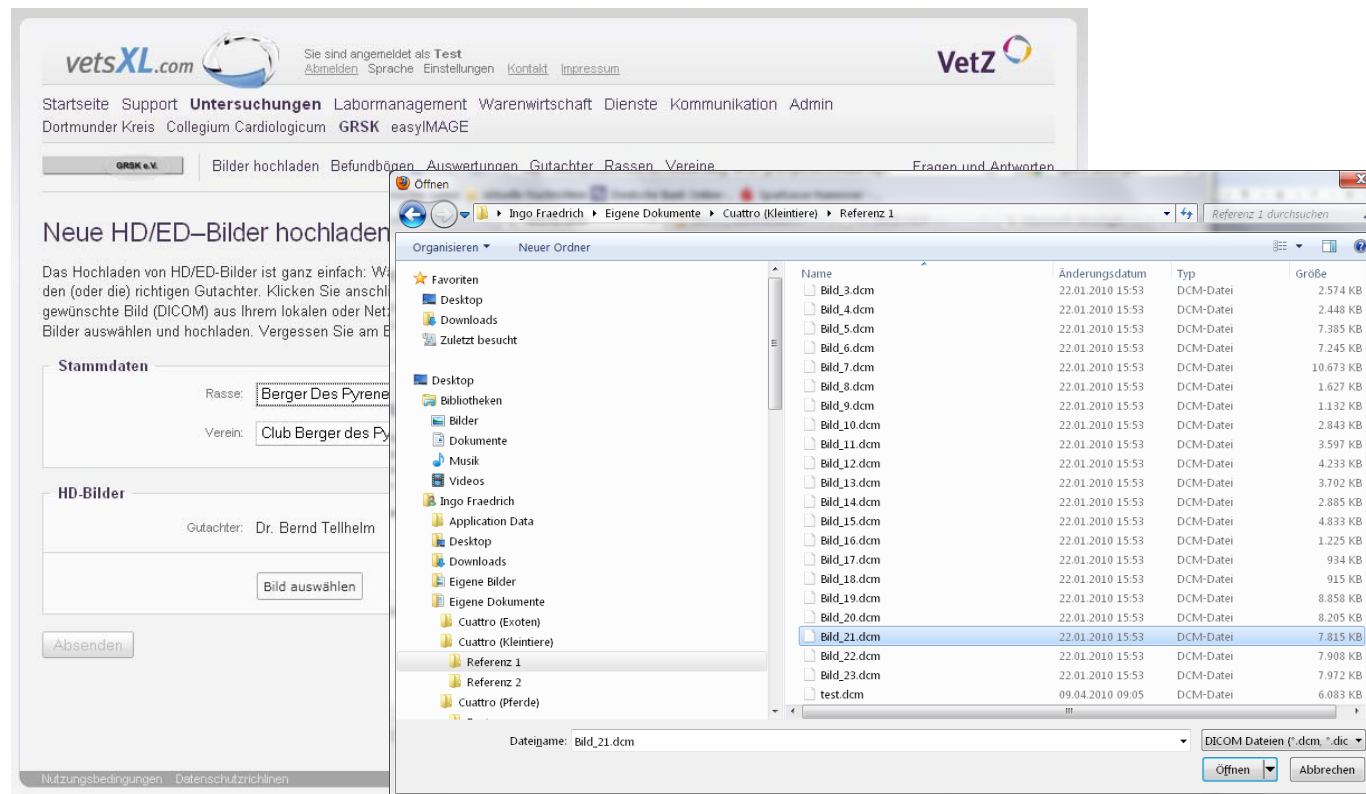


The screenshot shows the 'vetsXL.com' web interface for uploading HD/ED images. The page includes a navigation menu with options like 'Bilder hochladen', 'Befundbögen', and 'Auswertungen'. The main content area is titled 'Neue HD/ED-Bilder hochladen' and contains a form for 'Stammdaten' (Breed: Berger Des Pyrene, Club: Club Berger des Py) and 'HD-Bilder' (Referring Doctor: Dr. Bernd Tellhelm). A 'Bild auswählen' button is visible.

Overlaid on the web page is a Windows Explorer window showing the file system path: 'Ingo Fraedrich > Eigene Dokumente > Cuattro (Kleintiere) > Referenz 1'. The file list contains various DICOM files (Bild\_3.dcm to Bild\_23.dcm, test.dcm) with columns for Name, Änderungsdatum, Typ, and Größe. The file 'Bild\_21.dcm' is selected. The 'Dateiname' field at the bottom shows 'Bild\_21.dcm' and the file type is set to 'DICOM Dateien (\*.dcm; \*.dic)'. The 'Öffnen' button is highlighted.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Bild_3.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	2.574 KB
Bild_4.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	2.448 KB
Bild_5.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	7.385 KB
Bild_6.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	7.245 KB
Bild_7.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	10.673 KB
Bild_8.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	1.627 KB
Bild_9.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	1.132 KB
Bild_10.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	2.843 KB
Bild_11.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	3.597 KB
Bild_12.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	4.233 KB
Bild_13.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	3.702 KB
Bild_14.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	2.885 KB
Bild_15.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	4.833 KB
Bild_16.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	1.225 KB
Bild_17.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	934 KB
Bild_18.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	915 KB
Bild_19.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	8.858 KB
Bild_20.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	8.205 KB
Bild_21.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	7.815 KB
Bild_22.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	7.908 KB
Bild_23.dcm	22.01.2010 15:53	DICOM-Datei	7.972 KB
test.dcm	09.04.2010 09:05	DICOM-Datei	6.083 KB

## Vorgehensweise für Tierärzte

- **Schritt 5:** Während das erste Bild hochgeladen wird (der Fortschritt wird jeweils angezeigt), können mit einem Klick auf „Bild auswählen“ weitere Bilder ausgewählt und hochgeladen werden. Für fertig hochgeladene Bilder wird ein Thumbnail (Vorschaubild) des Originalbildes mit den aus dem DICOM-Header ausgelesenen Stammdaten angezeigt.

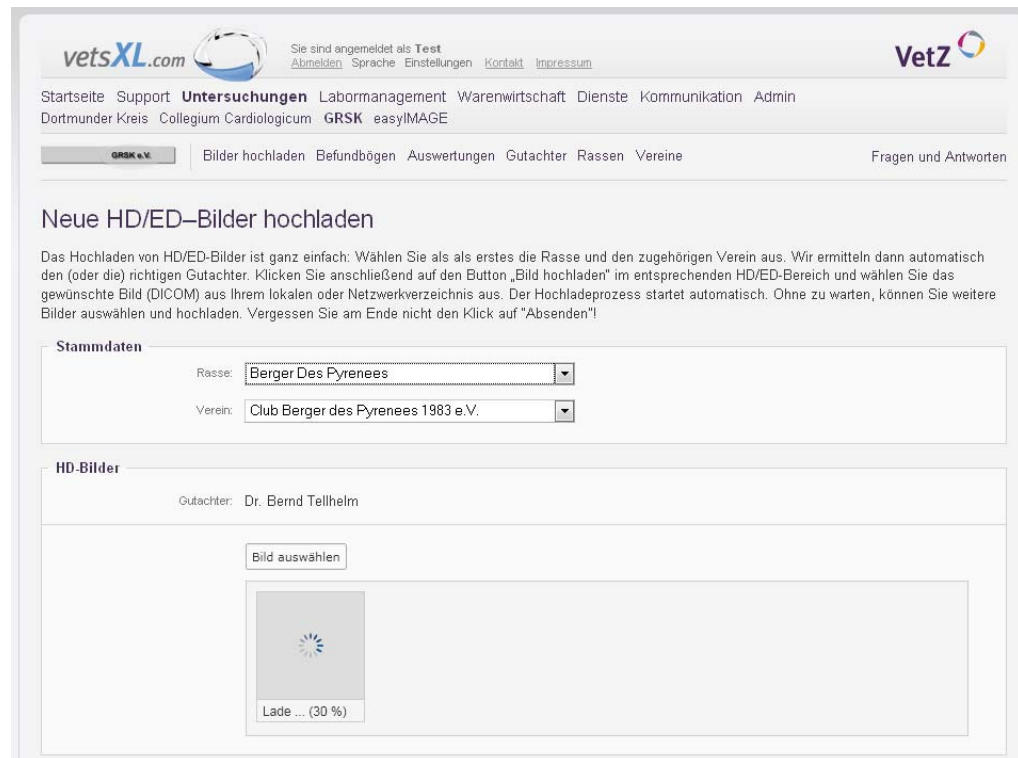

The screenshot shows the 'vetsXL.com' web interface. At the top, there is a navigation bar with the site logo, a user login status ('Sie sind angemeldet als Test'), and links for 'Abmelden', 'Sprache', 'Einstellungen', 'Kontakt', and 'Impressum'. Below this is a main menu with 'Startseite', 'Support', 'Untersuchungen', 'Labormanagement', 'Warenwirtschaft', 'Dienste', 'Kommunikation', and 'Admin'. A secondary menu lists 'Dortmunder Kreis', 'Collegium Cardiologicum', 'GRSK', and 'easyIMAGE'. The current page is titled 'GRSK e.V.' and has sub-menus for 'Bilder hochladen', 'Befundbögen', 'Auswertungen', 'Gutachter', 'Rassen', 'Vereine', and 'Fragen und Antworten'.

### Neue HD/ED-Bilder hochladen

Das Hochladen von HD/ED-Bilder ist ganz einfach: Wählen Sie als erstes die Rasse und den zugehörigen Verein aus. Wir ermitteln dann automatisch den (oder die) richtigen Gutachter. Klicken Sie anschließend auf den Button „Bild hochladen“ im entsprechenden HD/ED-Bereich und wählen Sie das gewünschte Bild (DICOM) aus Ihrem lokalen oder Netzwerkverzeichnis aus. Der Hochladeprozess startet automatisch. Ohne zu warten, können Sie weitere Bilder auswählen und hochladen. Vergessen Sie am Ende nicht den Klick auf "Absenden"!


**Stammdaten**

Rasse:

Verein:

**HD-Bilder**


Gutachter: Dr. Bernd Tellhelm



Lade ... (30 %)

## Vorgehensweise für Tierärzte

- **Schritt 6:** Wenn alle Bilder ausgewählt und hochgeladen wurden, muss am Ende der Seite auf den Button „**Absenden**“ geklickt werden. Erst dann werden die Bilder endgültig versendet und berechnet. Sowohl Verein als auch verantwortlicher Gutachter erhalten eine Benachrichtigung über den erfolgreichen Versand (wobei es vereinsspezifische Unterschiede geben kann).

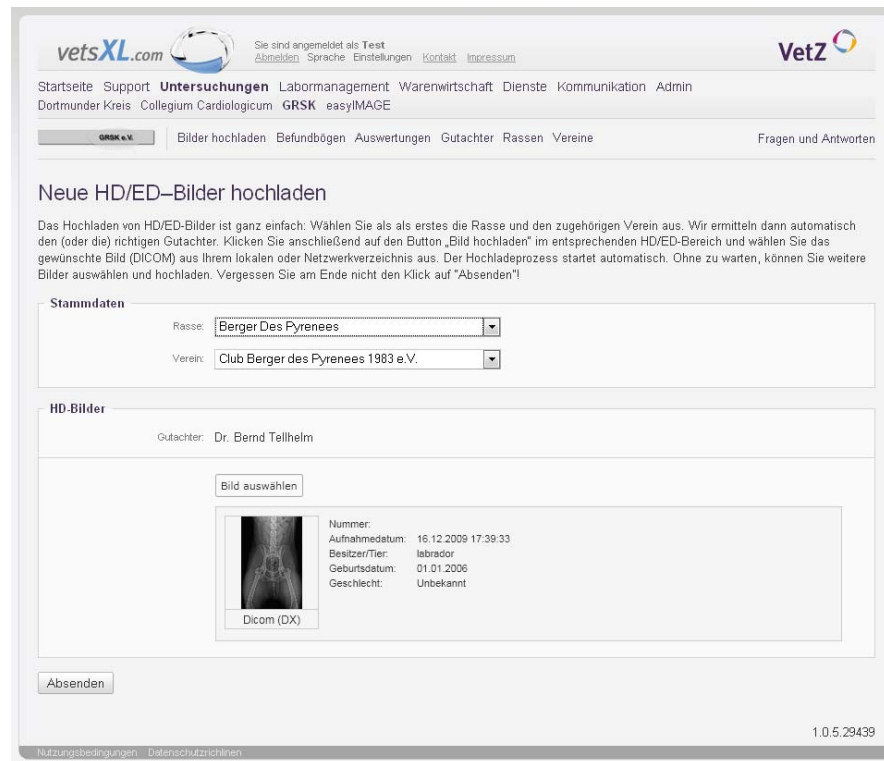


The screenshot shows the 'Neue HD/ED-Bilder hochladen' page on the vetsXL.com website. The page is for a user logged in as 'Test'. The navigation menu includes 'Startseite', 'Support', 'Untersuchungen', 'Labormanagement', 'Warenwirtschaft', 'Dienste', 'Kommunikation', and 'Admin'. The main content area is titled 'Neue HD/ED-Bilder hochladen' and contains instructions for uploading images. Below the instructions, there are two dropdown menus for 'Rasse' (set to 'Berger Des Pyrenees') and 'Verein' (set to 'Club Berger des Pyrenees 1983 e.V.'). The 'HD-Bilder' section shows the 'Gutachter' as 'Dr. Bernd Tellhelm'. A 'Bild auswählen' button is present, and a small image of a dog's paws is shown with a 'Dicom (DX)' label. To the right of the image, the following metadata is displayed: 'Nummer:', 'Aufnahmedatum: 16.12.2009 17:39:33', 'Besitzer/Tier: labrador', 'Geburtsdatum: 01.01.2006', and 'Geschlecht: Unbekannt'. At the bottom of the form is an 'Absenden' button. The footer contains 'Nutzungsbedingungen', 'Datenschutzrichtlinien', and the version number '1.0.5.29439'.



## Vorgehensweise für Tierärzte

Der Tierarzt hat jederzeit einen Überblick über seine hochgeladenen Bilder. Ein Klick auf den entsprechenden Eintrag öffnet die Details zum jeweiligen Eintrag.

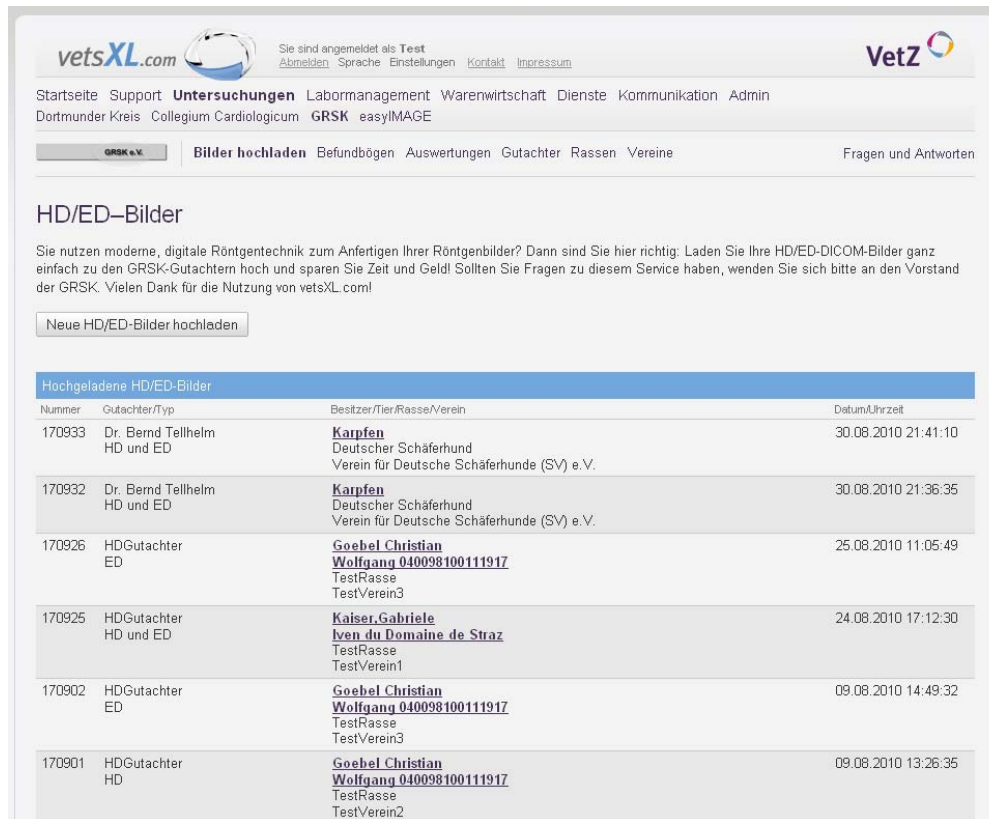

The screenshot shows the website interface for vetsXL.com. At the top, there is a navigation bar with the site logo, user login information ("Sie sind angemeldet als Test"), and various menu items like "Startseite", "Support", "Untersuchungen", "Labormanagement", "Warenwirtschaft", "Dienste", "Kommunikation", and "Admin". Below this, there are more specific navigation options including "Dortmunder Kreis", "Collegium Cardiologicum", "GRSK", and "easyIMAGE". A main navigation bar highlights "Bilder hochladen" and includes other options like "Befundbögen", "Auswertungen", "Gutachter", "Rassen", "Vereine", and "Fragen und Antworten".

The main content area is titled "HD/ED-Bilder" and contains a brief introduction about using digital X-ray technology. Below the text is a button labeled "Neue HD/ED-Bilder hochladen".

The core of the page is a table titled "Hochgeladene HD/ED-Bilder" with the following data:

Nummer	Gutachter/Typ	Besitzer/Tier/Rasse/Verein	Datum/Uhrzeit
170933	Dr. Bernd Tellhelm HD und ED	<b>Karpfen</b> Deutscher Schäferhund Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.	30.08.2010 21:41:10
170932	Dr. Bernd Tellhelm HD und ED	<b>Karpfen</b> Deutscher Schäferhund Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.	30.08.2010 21:36:35
170926	HDGutachter ED	<b>Goebel Christian</b> <b>Wolfgang 040098100111917</b> TestRasse TestVerein3	25.08.2010 11:05:49
170925	HDGutachter HD und ED	<b>Kaiser Gabriele</b> <b>Iven du Domaine de Straz</b> TestRasse TestVerein1	24.08.2010 17:12:30
170902	HDGutachter ED	<b>Goebel Christian</b> <b>Wolfgang 040098100111917</b> TestRasse TestVerein3	09.08.2010 14:49:32
170901	HDGutachter HD	<b>Goebel Christian</b> <b>Wolfgang 040098100111917</b> TestRasse TestVerein2	09.08.2010 13:26:35

## Weitere Informationen für Tierärzte

- Nach dem Hochladen werden die Bilder bei uns gespeichert und analysiert.
- Eine Qualitätseinstufung und Bewertung findet nicht statt.
- Bei Aufnahmen, die dem entsprechenden Gutachter anonymisiert zur Verfügung gestellt werden müssen (einige Vereine wünschen das so), sorgen wir dafür, dass die entsprechenden Daten automatisch ausgeblendet werden. Für den Gutachter sind dann keine Besitzer- und Tierinformationen zu erkennen.
- Das Bild wird bei uns im Originalformat 10 Jahre archiviert und kann auf Anfrage jederzeit wieder bereitgestellt werden.
- Das Bild wird zusammen mit Stammdaten in einen neuen GRSK-Untersuchungsbogen übernommen und dem jeweiligen Gutachter zur Vervollständigung zur Verfügung gestellt (teilweise erst nach Zwischenprüfung durch den zuständigen Verein).
- Jede Untersuchung (entweder nur HD, nur ED oder beides) wird von uns mit 4 € abgerechnet. Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise an den hochladenden Tierarzt.
- In einem noch zu definierenden Zeitraum erhält der GRSK BluRay's mit Kopien der Bilder und Untersuchungsergebnisse.

## Vorgehensweise für Vereine


Sobald ein Tierarzt digital angefertigte Röntgenaufnahmen über [www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com) hochgeladen hat, hat der entsprechende Verein Zugriff auf die Aufnahmen. Der Verein (in den meisten Fällen auch der Gutachter) erhält unmittelbar nach dem Hochladen automatisch eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail. Der Verein kann die Bilder betrachten, falls notwendig zur Begutachtung freigeben und sie jederzeit herunterladen zur individuellen Archivierung.

[www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com) funktioniert mit jedem gängigen Browser (Mozilla Firefox, Internet-Explorer, Google Chrome, Safari, Opera). Vor der ersten Nutzung versucht der Browser die aktuellste Version des Web-PlugIn Silverlight von Microsoft zu installieren, falls diese nicht bereits installiert ist.

Vereine, die diesen Service nutzen wollen, müssen bei [www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com) registriert und über die Überlassung einer Kopie des Personalausweises des Verantwortlichen oder des Vereinsregisterauszuges authentifiziert sein. Die Nutzung des Services ist kostenlos.

## Vorgehensweise für Vereine


- **Schritt 1:** Anmeldung bei [www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com). Wer noch nicht registriert ist, muss eine Registrierung durchführen und ein Kopie des Personalausweises des Verantwortlichen oder des Vereinsregisterauszuges an 0511/560696-99 faxen. Nur registrierte Vereine haben Zugriff auf den GRSK-Bereich.

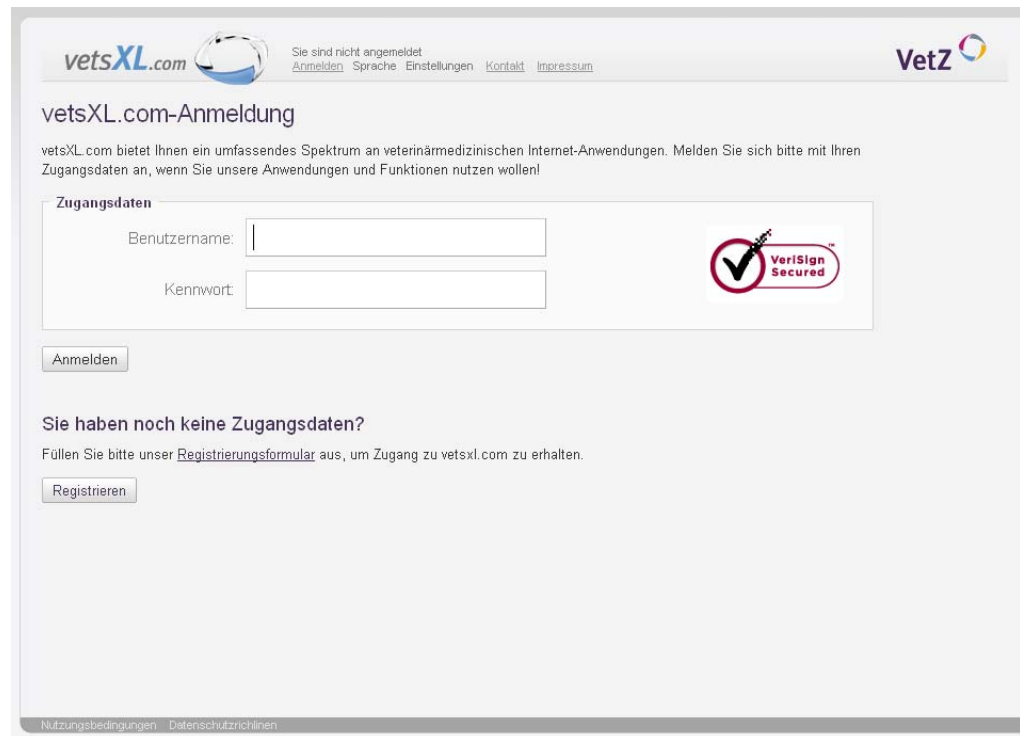

The screenshot shows the login page for vetsXL.com. At the top left is the vetsXL.com logo and a navigation menu with links for 'Anmelden', 'Sprache', 'Einstellungen', 'Kontakt', and 'Impressum'. At the top right is the VetZ logo. The main heading is 'vetsXL.com-Anmeldung'. Below this is a paragraph explaining that vetsXL.com offers a range of veterinary internet applications and that users should provide login data to use them. The login form is titled 'Zugangsdaten' and contains two input fields: 'Benutzername:' and 'Kennwort:'. To the right of the password field is a VeriSign Secured logo. Below the input fields is an 'Anmelden' button. Further down, there is a section titled 'Sie haben noch keine Zugangsdaten?' with a paragraph asking users to fill out a registration form to get access. Below this is a 'Registrieren' button. At the bottom of the page, there are links for 'Nutzungsbedingungen' and 'Datenschutzrichtlinien'.

## Vorgehensweise für Vereine


- **Schritt 2:** Nach erfolgreicher Anmeldung wird der Menüpunkt „**Eine Liste meiner Befundbögen anzeigen (GRSK)**“ angeklickt und ...

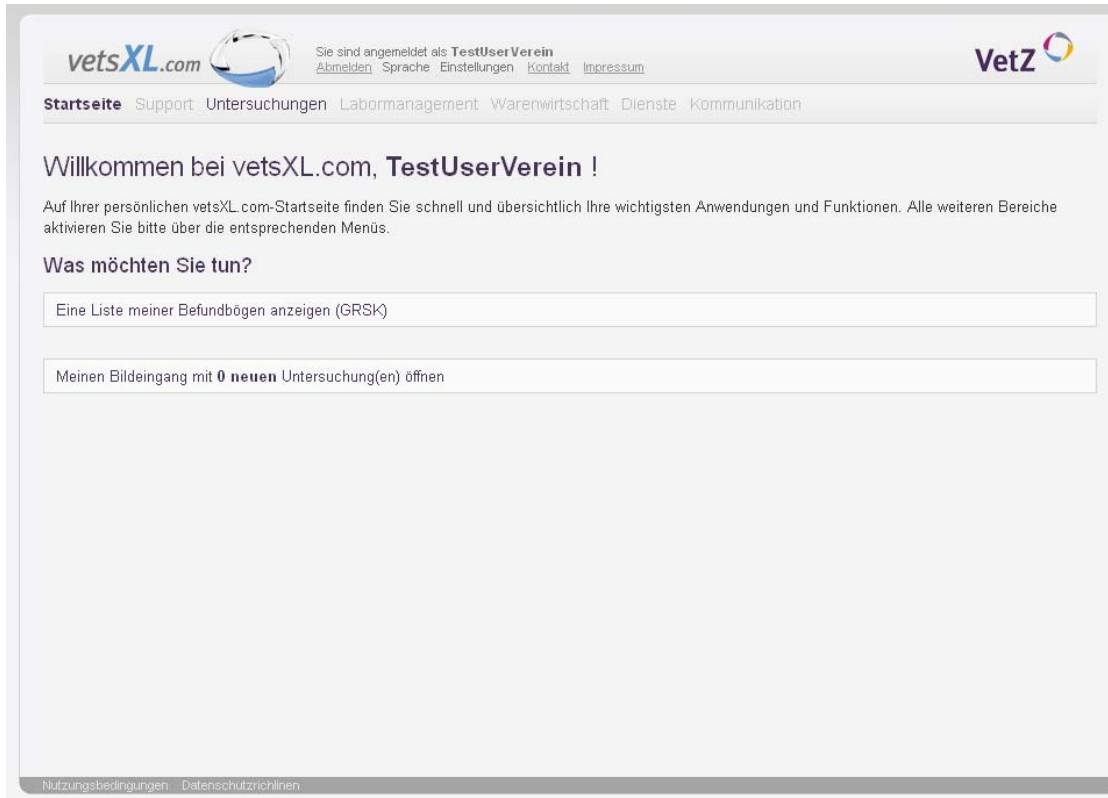


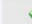






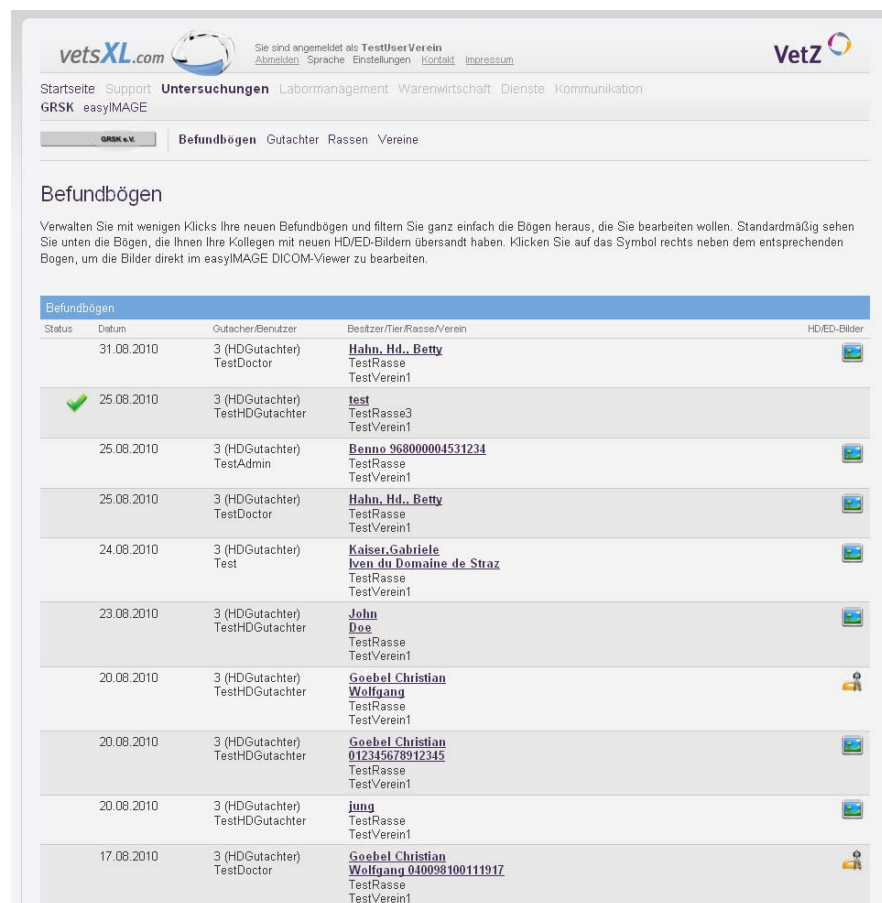

The screenshot shows the user interface of the vetsXL.com website. At the top left, the logo 'vetsXL.com' is displayed next to a circular icon. To the right, the user is logged in as 'TestUserVerein' with links for 'Abmelden', 'Sprache', 'Einstellungen', 'Kontakt', and 'Impressum'. The 'VetZ' logo is in the top right corner. A navigation menu includes 'Startseite', 'Support', 'Untersuchungen', 'Labormanagement', 'Warenwirtschaft', 'Dienste', and 'Kommunikation'. The main content area features a welcome message: 'Willkommen bei vetsXL.com, TestUserVerein !' followed by a brief explanation of the site's purpose. Below this, a section titled 'Was möchten Sie tun?' contains two buttons: 'Eine Liste meiner Befundbögen anzeigen (GRSK)' and 'Meinen Bildeingang mit 0 neuen Untersuchung(en) öffnen'. At the bottom, there are links for 'Nutzungsbedingungen' and 'Datenschutzrichtlinien'.

## Vorgehensweise für Vereine

- **Schritt 3:** ... und alle Bögen mit Bildern angezeigt. An der Symbolik vor und hinter den jeweiligen Einträgen ist zu erkennen, welche Bilder neu, geblockt (für Vereine, die die Bilder sehen wollen, bevor der Gutachter sie erhält), vermessen oder komplett fertiggestellt sind. Bei Vereinen, die die Bilder den Gutachtern nur anonymisiert zur Verfügung stellen wollen, werden Daten, die für den Gutachter nicht sichtbar sind, blass dargestellt, so dass die korrekte Darstellung überprüft werden kann. Ein Klick auf den Besitzer/Tier/... öffnet Details mit den Bildern als Thumbs, ein Klick auf eines der beiden rechten Symbole öffnet direkt den DICOM-Viewer zur Betrachtung der Bilder.



The screenshot shows the VetsXL.com web interface. At the top, there is a navigation bar with 'vetsXL.com' and 'VetZ' logos. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of tabs: 'GRSK e.V.', 'Befundbögen', 'Gutachter', 'Rassen', and 'Vereine'. The main content area is titled 'Befundbögen' and contains a table with the following columns: 'Status', 'Datum', 'Gutachter/Besitzer', and 'HD/ED-Bilder'. The table lists several entries with their respective dates, user names, and status icons.

Status	Datum	Gutachter/Besitzer	Besitzer/Tier/Rasse/Verein	HD/ED-Bilder
	31.08.2010	3 (HDGutachter) TestDoctor	<b>Hahn, Hd., Betty</b> TestRasse TestVerein1	
	25.08.2010	3 (HDGutachter) TestHDGutachter	test TestRasse3 TestVerein1	
	25.08.2010	3 (HDGutachter) TestAdmin	<b>Benno 968000004531234</b> TestRasse TestVerein1	
	25.08.2010	3 (HDGutachter) TestDoctor	<b>Hahn, Hd., Betty</b> TestRasse TestVerein1	
	24.08.2010	3 (HDGutachter) Test	<b>Kaiser, Gabriele</b> <b>Ivan du Domaine de Straz</b> TestRasse TestVerein1	
	23.08.2010	3 (HDGutachter) TestHDGutachter	<b>John</b> <b>Doe</b> TestRasse TestVerein1	
	20.08.2010	3 (HDGutachter) TestHDGutachter	<b>Goebel Christian</b> <b>Wolfgang</b> TestRasse TestVerein1	
	20.08.2010	3 (HDGutachter) TestHDGutachter	<b>Goebel Christian</b> <b>012345678912345</b> TestRasse TestVerein1	
	20.08.2010	3 (HDGutachter) TestHDGutachter	<b>jung</b> TestRasse TestVerein1	
	17.08.2010	3 (HDGutachter) TestDoctor	<b>Goebel Christian</b> <b>Wolfgang 04009810011917</b> TestRasse TestVerein1	


## Vorgehensweise für Vereine

- **Schritt 4a:** Im DICOM-Viewer können die Bilder betrachtet und/oder heruntergeladen werden.



## Vorgehensweise für Vereine

- **Schritt 4b:** In der Detailseite können alle Daten überprüft werden. Vereine, die die Bilder vor dem Gutachter sehen möchten, können die Bilder hier zur Begutachtung freigeben und an den Gutachter „virtuell“ weiterleiten. Daraufhin erhält der Gutachter eine entsprechende E-Mail, damit er weiß, dass er die Bilder nun begutachten kann.

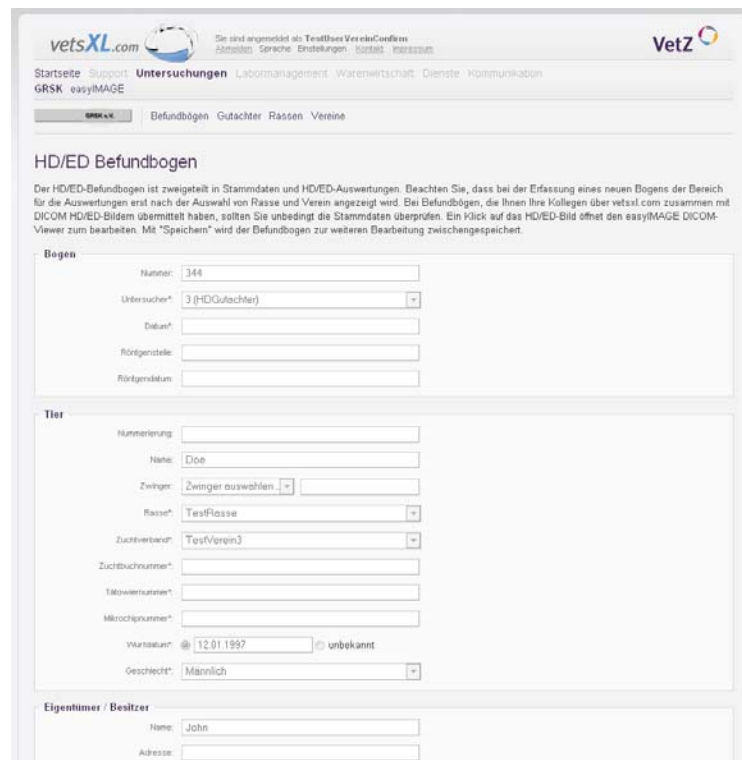

The screenshot shows the 'HD/ED Befundbogen' form in the vetsXL.com interface. The form is divided into several sections:

- Header:** vetsXL.com logo, user login information (TestUser VereinConf), and navigation links (Startseite, Support, Untersuchungen, Labormanagement, Warenwirtschaft, Dienste, Kommunikation, GRSK, easyIMAGE).
- Navigation:** Breadcrumbs: GRSK > Befundbögen > Gutachter > Rassen > Vereine.
- HD/ED Befundbogen:** A section with a descriptive paragraph and a 'Bogen' form containing fields for 'Nummer' (344), 'Untersucher\*' (3 (HDGutachter)), 'Diagnose\*', 'Röntgenstelle', and 'Röntgenblattnummer'.
- Tier:** A section with fields for 'Nummerierung', 'Name' (Doe), 'Zwinger' (Zwinger auswählen), 'Rasse\*' (TersFlasse), 'Zuchtverband\*' (TersVerein3), 'Zuchtbuchnummer\*', 'Tikwennnummer\*', 'Mikrochipnummer\*', 'Wurstdatum' (12.01.1997), and 'Geschlecht\*' (Männlich).
- Eigentümer / Besitzer:** Fields for 'Name' (John) and 'Adresse'.



## Weitere Informationen für Vereine

- Alle Bilder werden bei uns im Originalformat 10 Jahre archiviert und können von jedem registrierten Verein jederzeit heruntergeladen werden.
- Jeder Verein hat die volle Kontrolle und Übersicht über die Aufnahmen sobald der Tierarzt sie angefertigt hat. Er sieht den Status jedes Bildes bis hin zur endgültigen Begutachtung.
- Der Verein kann rassenspezifische Auswertungen zu seinen Rassen vornehmen.
- Der Verein kann Bilder zu wissenschaftlichen Zwecken für die Gutachter freigeben.
- Der Verein kann sein Kontaktdaten selbstständig verwalten, so dass Gutachter und Tierärzte stets aktuelle Daten zur Verfügung haben.
- Der Service ist kostenfrei.

## Vorgehensweise für Gutachter


Sobald ein Tierarzt digital angefertigte Röntgenaufnahmen über [www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com) hochgeladen hat, hat der entsprechende Gutachter Zugriff auf die Aufnahmen. Vorausgesetzt, der Verein hat der unmittelbaren Weiterleitung an den Gutachter zugestimmt. Falls nicht, muss auf das „OK“ des Vereins gewartet werden. Der Gutachter erhält unmittelbar nach dem Hochladen oder der Freigabe durch den Verein automatisch eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail. Der Gutachter kann die Bilder vermessen und begutachten.

[www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com) funktioniert mit jedem gängigen Browser (Mozilla Firefox, Internet-Explorer, Google Chrome, Safari, Opera). Vor der ersten Nutzung versucht der Browser die aktuellste Version des Web-PlugIn Silverlight von Microsoft zu installieren, falls diese nicht bereits installiert ist.

Gutachter, die diesen Service nutzen wollen, müssen bei [www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com) registriert und über die Überlassung einer Kopie des Personalausweises oder der Approbationsurkunde authentifiziert sein.

## Vorgehensweise für Gutachter


- **Schritt 1:** Anmeldung bei [www.myvetsxl.com](http://www.myvetsxl.com). Wer noch nicht registriert ist, muss eine Registrierung durchführen und ein Kopie des Personalausweises oder der Approbationsurkunde an 0511/560696-99 faxen. Nur registrierte Gutachter haben Zugriff auf den GRSK-Bereich.

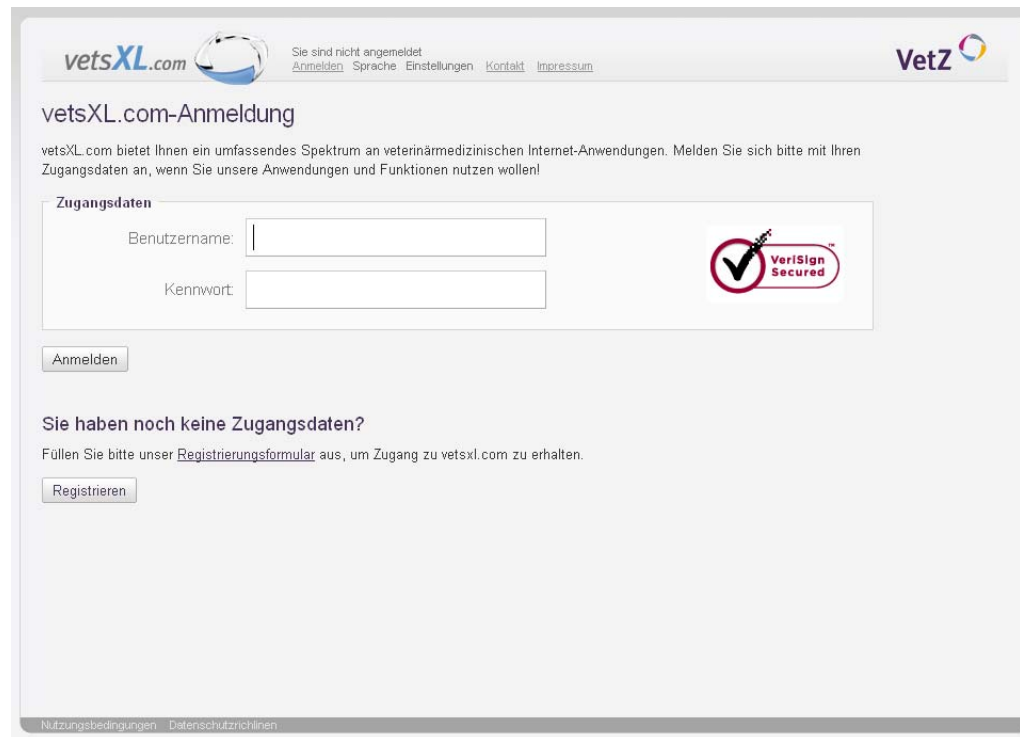

The screenshot shows the login page for vetsXL.com. At the top left is the vetsXL.com logo and a navigation menu with links for 'Anmelden', 'Sprache', 'Einstellungen', 'Kontakt', and 'Impressum'. At the top right is the VetZ logo. The main heading is 'vetsXL.com-Anmeldung'. Below this is a paragraph explaining that vetsXL.com offers a wide range of veterinary internet applications and that users should provide login data to use them. The login form is titled 'Zugangsdaten' and contains two input fields: 'Benutzername:' and 'Kennwort:'. To the right of the password field is a VeriSign Secured logo. Below the input fields is an 'Anmelden' button. Underneath the login form, there is a section titled 'Sie haben noch keine Zugangsdaten?' with a paragraph asking users to fill out a registration form to get access. A 'Registrieren' button is located below this text. At the bottom of the page, there are links for 'Nutzungsbedingungen' and 'Datenschutzrichtlinien'.

## Vorgehensweise für Gutachter


- **Schritt 2:** Nach erfolgreicher Anmeldung muss der Menüpunkt „**Eine Liste meiner Befundbögen anzeigen (GRSK)**“ (Schritt 3a) oder „**Einen neuen Befundbogen ausfüllen (GRSK)**“ (Schritt 3b) angeklickt werden.

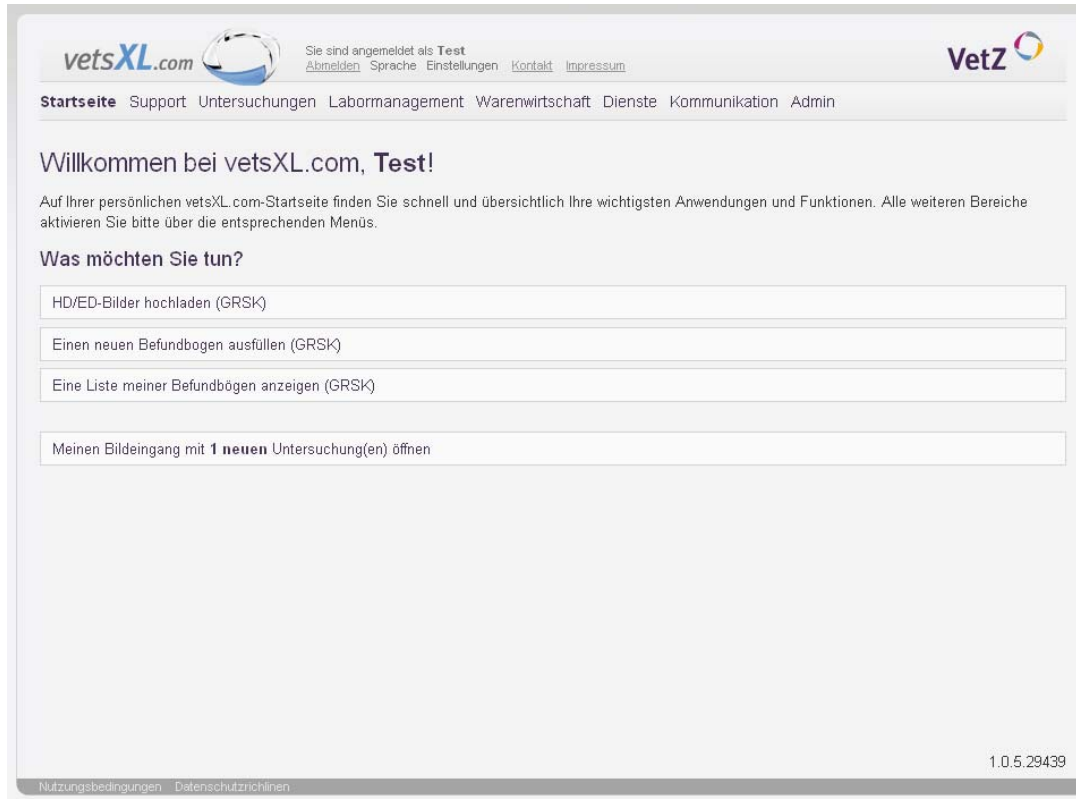

The screenshot shows the user interface of vetsXL.com. At the top left is the logo 'vetsXL.com' and a user profile icon. To the right, it says 'Sie sind angemeldet als Test' with links for 'Abmelden', 'Sprache', 'Einstellungen', 'Kontakt', and 'Impressum'. The VetZ logo is in the top right corner. Below the header is a navigation menu with items: 'Startseite', 'Support', 'Untersuchungen', 'Labormanagement', 'Warenwirtschaft', 'Dienste', 'Kommunikation', and 'Admin'. The main content area starts with a welcome message: 'Willkommen bei vetsXL.com, Test!' followed by a paragraph: 'Auf Ihrer persönlichen vetsXL.com-Startseite finden Sie schnell und übersichtlich Ihre wichtigsten Anwendungen und Funktionen. Alle weiteren Bereiche aktivieren Sie bitte über die entsprechenden Menüs.' Below this is the section 'Was möchten Sie tun?' with four buttons: 'HD/ED-Bilder hochladen (GRSK)', 'Einen neuen Befundbogen ausfüllen (GRSK)', 'Eine Liste meiner Befundbögen anzeigen (GRSK)', and 'Meinen Bildeingang mit 1 neuen Untersuchung(en) öffnen'. At the bottom right of the page, the version number '1.0.5.29439' is displayed. At the bottom left, there are links for 'Nutzungsbedingungen' and 'Datenschutzrichtlinien'.

## Vorgehensweise für Gutachter

- **Schritt 3a/1:** In dieser Liste werden standardmäßig nach dem Aufruf dieser Seite alle Bögen angezeigt, die nicht begutachtete Bilder beinhalten (üblicherweise die, die von den Tierärzten hochgeladen wurden). Über „**Filter**“-Einstellungen können aber auch alle anderen Bögen aufgelistet werden (nicht den Klick auf „**Aktualisieren**“ vergessen, wenn Filtereinstellungen geändert wurden). Um einen Bildersatz zu begutachten, genügt ein Klick auf das Bildersymbol rechts neben dem Eintrag. Es werden automatisch alle Bilder angezeigt, die zu diesem Besitzer/Tier/... dazugehören (z.B. alle HD/ED-Aufnahmen).

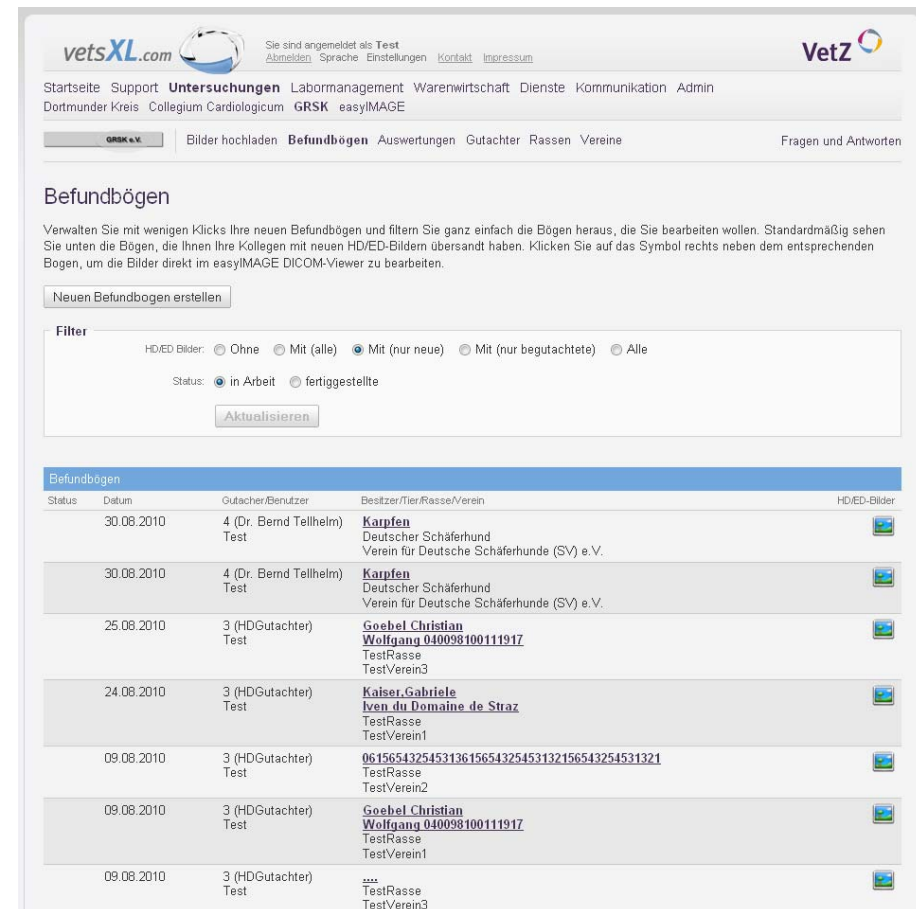

**vetsXL.com** Sie sind angemeldet als **Test**  
Abmelden Sprache Einstellungen Kontakt Impressum

Startseite Support **Untersuchungen** Labormanagement Warenwirtschaft Dienste Kommunikation Admin  
Dortmunder Kreis Collegium Cardiologicum **GRSK** easyIMAGE

**GRSK e.V.** Bilder hochladen **Befundbögen** Auswertungen Gutachter Rassen Vereine Fragen und Antworten

### Befundbögen

Verwalten Sie mit wenigen Klicks Ihre neuen Befundbögen und filtern Sie ganz einfach die Bögen heraus, die Sie bearbeiten wollen. Standardmäßig sehen Sie unten die Bögen, die Ihnen Ihre Kollegen mit neuen HD/ED-Bildern übersandt haben. Klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem entsprechenden Bogen, um die Bilder direkt im easyIMAGE DICOM-Viewer zu bearbeiten.




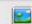



Neuen Befundbogen erstellen

**Filter**

HD/ED Bilder:  Ohne  Mit (alle)  Mit (nur neue)  Mit (nur begutachtete)  Alle

Status:  in Arbeit  fertiggestellte

Aktualisieren

Status	Datum	Gutachter/Benutzer	Besitzer/Tier/Rasse/Verein	HD/ED-Bilder
	30.08.2010	4 (Dr. Bernd Tellhelm) Test	<b>Karpfen</b> Deutscher Schäferhund Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.	
	30.08.2010	4 (Dr. Bernd Tellhelm) Test	<b>Karpfen</b> Deutscher Schäferhund Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.	
	25.08.2010	3 (HD Gutachter) Test	<b>Goebel Christian</b> <b>Wolfgang 040098100111917</b> TestRasse TestVerein3	
	24.08.2010	3 (HD Gutachter) Test	<b>Kaiser Gabriele</b> <b>Iven du Domaine de Straz</b> TestRasse TestVerein1	
	09.08.2010	3 (HD Gutachter) Test	<b>061565432545313615654325453132156543254531321</b> TestRasse TestVerein2	
	09.08.2010	3 (HD Gutachter) Test	<b>Goebel Christian</b> <b>Wolfgang 040098100111917</b> TestRasse TestVerein1	
	09.08.2010	3 (HD Gutachter) Test	**** TestRasse TestVerein3	

## Vorgehensweise für Gutachter


- **Schritt 3a/2:** Im DICOM-Viewer können die Bilder betrachtet, vermessen und begutachtet werden. Vielfältige Funktionen zur Bildanpassung und –optimierung stehen hier zur Verfügung. Nach erfolgreicher Begutachtung/Vermessung muss das Ergebnis mit einem Klick auf „**Als begutachtet speichern**“ gespeichert werden. Nur so werden die Messergebnisse in den entsprechenden Bogen übernommen und das Bild als begutachtet gekennzeichnet.



## Vorgehensweise für Gutachter

- **Schritt 3b:** Im Detailbogen kann entweder ein neuer Bogen erfasst oder ein vorhandener Bogen mit eingesandten Bildern der Tierärzte weiterbearbeitet werden. Die Bilder werden weiter unten im Bogen entsprechend im HD- oder ED-Bereich angezeigt. Insbesondere bei eingesandten Bögen ist eine Überprüfung der automatisch eingetragenen Daten zu Besitzer und Tier zwingend notwendig, da aus dem limitierten DICOM-Format selten die richtigen Felder ausgefüllt werden können.

Die weitere Handhabung des Bogens ist aus dem „alten“ Portal bekannt.

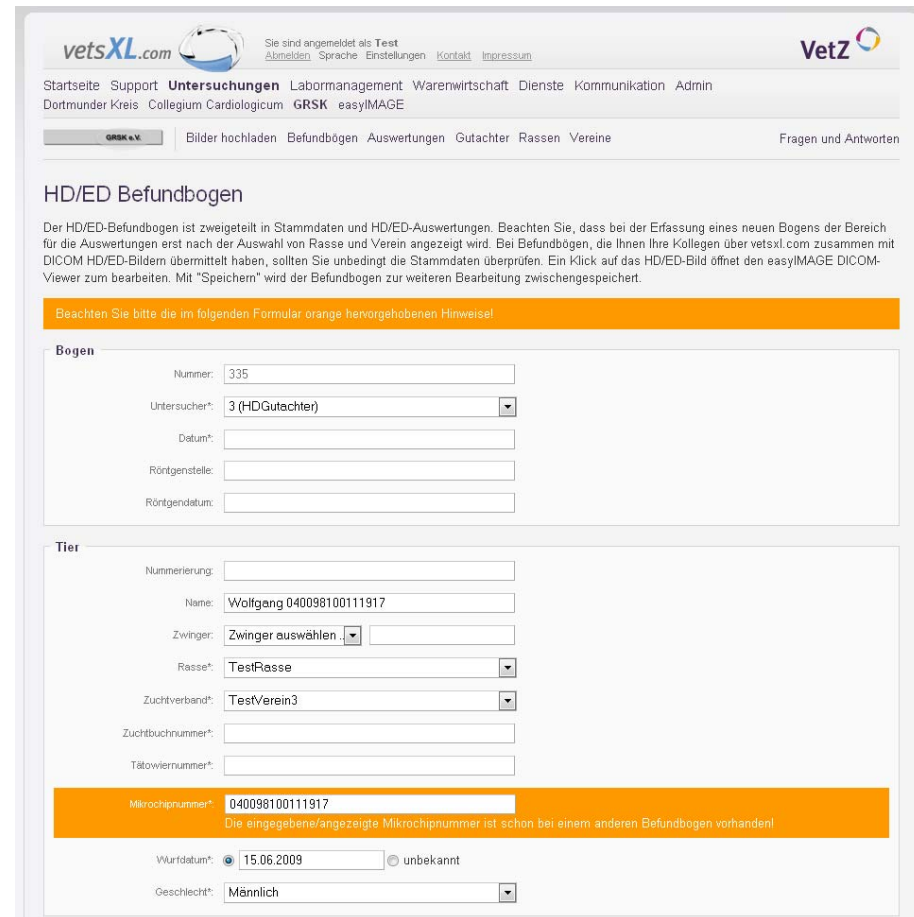

vetsXL.com Sie sind angemeldet als Test  
Abmelden Sprache Einstellungen Kontakt Impressum

Startseite Support **Untersuchungen** Labormanagement Warenwirtschaft Dienste Kommunikation Admin  
Dortmunder Kreis Collegium Cardiologicum GRSK easyIMAGE

GRSK e.V. Bilder hochladen Befundbögen Auswertungen Gutachter Rassen Vereine Fragen und Antworten

### HD/ED Befundbogen

Der HD/ED-Befundbogen ist zweigeteilt in Stammdaten und HD/ED-Auswertungen. Beachten Sie, dass bei der Erfassung eines neuen Bogens der Bereich für die Auswertungen erst nach der Auswahl von Rasse und Verein angezeigt wird. Bei Befundbögen, die Ihnen Ihre Kollegen über vetsxl.com zusammen mit DICOM HD/ED-Bildern übermittelt haben, sollten Sie unbedingt die Stammdaten überprüfen. Ein Klick auf das HD/ED-Bild öffnet den easyIMAGE DICOM-Viewer zum bearbeiten. Mit "Speichern" wird der Befundbogen zur weiteren Bearbeitung zwischengespeichert.

Beachten Sie bitte die im folgenden Formular orange hervorgehobenen Hinweise!

**Bogen**

Nummer: 335  
Untersucher: 3 (HDGutachter)  
Datum:  
Röntgenstelle:  
Röntgendatum:

**Tier**

Nummerierung:  
Name: Wolfgang 040098100111917  
Zwinger: Zwinger auswählen  
Rasse: TestRasse  
Zuchtverband: TestVerein3  
Zuchtbuchnummer:  
Tätowiernummer:

Mikrochipnummer: 040098100111917  
Die eingegebene/angezeigte Mikrochipnummer ist schon bei einem anderen Befundbogen vorhanden!

Wurfdatum: 15.06.2009 unbekannt  
Geschlecht: Männlich

## Weitere Informationen für Gutachter

- Alle Bilder werden bei uns im Originalformat 10 Jahre archiviert und können – Einverständnis des Vereins vorausgesetzt - von jedem registrierten Gutachter heruntergeladen werden.
- Jeder Gutachter hat die volle Kontrolle und Übersicht über seine Bögen. Ob Bilder für eigene Zwecke weiterverarbeitet werden dürfen, entscheidet im Zweifelsfall der entsprechende Verein.
- Der Gutachter kann rassenspezifische Auswertungen zu seinen Rassen vornehmen.
- Der Gutachter kann sein Kontaktdaten selbstständig verwalten, so dass Vereine und Tierärzte stets aktuelle Daten zur Verfügung haben.
- Das Portal und der integrierte DICOM-Viewer können Browser- und Ortsunabhängig an jeder Ort der Welt mit Internetzugang genutzt werden. Das lokale Installieren von CD's und DICOM-Viewern entfällt damit völlig und bietet trotzdem volle DICOM-Qualität – unabhängig vom digitalen Röntgensystem und genutzten PACS.
- Das integrierte E-Mail-System informiert jederzeit über neu hochgeladene Bilder der Tierärzte oder Veränderungen seitens der Vereine.